


Variolink® Esthetic DC


Eingliederung von Inlays (Glaskeramik, z. B. IPS e.max®)

Einprobe


Variolink Esthetic Try-In

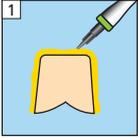


Auftragen der Try-In Paste

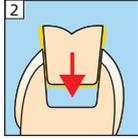


Einprobe der Restauration

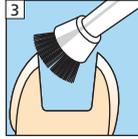




Reinigung nach der Einprobe

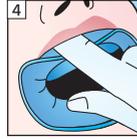

Trockenlegung

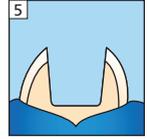

Restauration

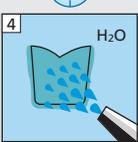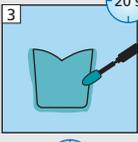
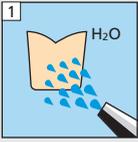


Monobond Etch & Prime








Befestigung

Variolink Esthetic DC




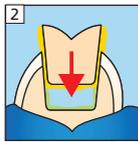
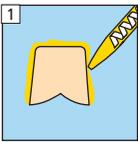


Bluephase Style

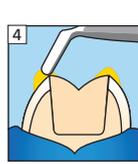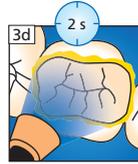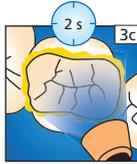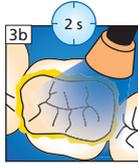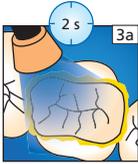

Restauration bis zum Ende der abschließenden Polymerisation fixieren

Liquid Strip

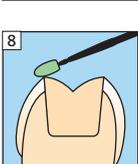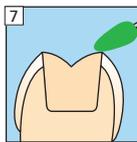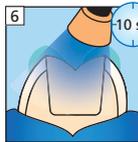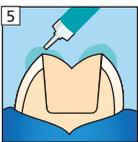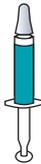


Fluor Protector





* pro Segment und mm Keramik

Polieren


Präparation

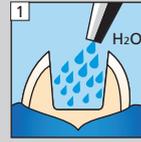


Total Etch optional

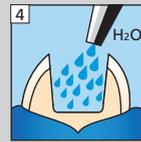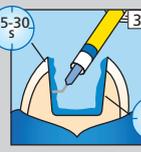

Adhese Universal

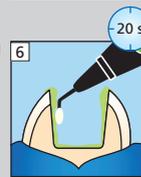

Bluephase Style

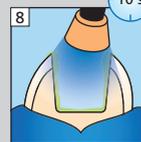

Pfützenbildung vermeiden



mehr Informationen unter www.cementation-navigation.com

CE 0123



Bitte Gebrauchsinformation beachten

ivoclar vivadent clinical

Erstellungsdatum: 2015-07-06
681581/DE/Rev. 0

Variolink® Esthetic DC


Eingliederung von Kronen und Brücken
(Glaskeramik, z. B. IPS e.max®)

Einprobe

Variolink Esthetic Try-In




Auftragen der Try-In Paste

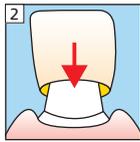


Einprobe der Restauration



Reinigung nach der Einprobe

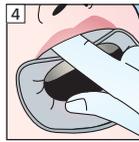

Trockenlegung

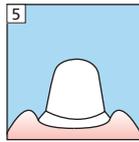


Restauration




H₂O




LUFT!

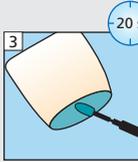

20 s

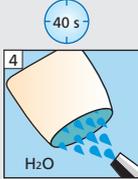

H₂O

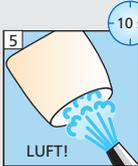


10 s

Monobond Etch & Prime




Präparation

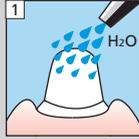

H₂O



LUFT!

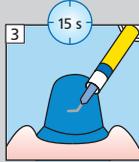

15 s

Total Etch


optional



H₂O




LUFT!

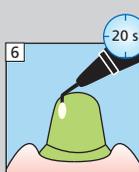

20 s

Adhese Universal

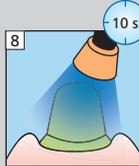

10 s



Bluephase Style

7 LUFT!


Pfützenbildung vermeiden

Befestigung


Variolink Esthetic DC

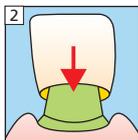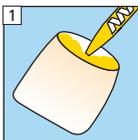


Bluephase Style

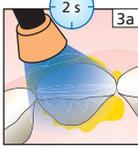


2 s

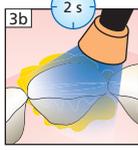


3a 3b 2 s

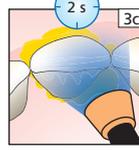

2 s

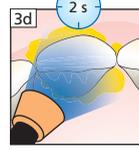


3c 3d 2 s

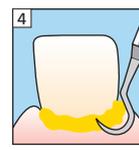


Restauration bis zum Ende der abschliessenden Polymerisation fixieren

Liquid Strip

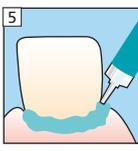


10 s*

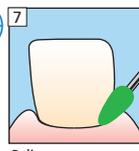

Polieren

Fluor Protector

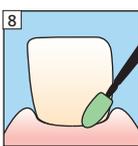

mehr Informationen unter www.cementation-navigation.com

CE 0123



Bitte Gebrauchsinformation beachten

ivoclar vivadent
clinical