


Variolink Esthetic® LC


Eingliederung von Inlays (Stärke < 2 mm) (Glaskeramik, z.B. IPS e.max®)

Einprobe

Variolink Esthetic Try-In

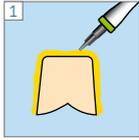

Auftragen der Try-In Paste

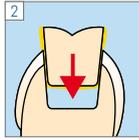


Einprobe der Restauration




Reinigung nach der Einprobe





Trockenlegung

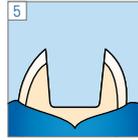


Restauration

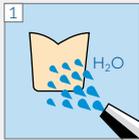

Monobond Etch & Prime

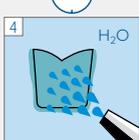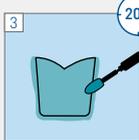

Präparation

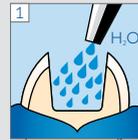


Total Etch:

optional




Adhese Universal

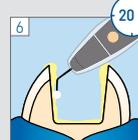



Pfützenbildung vermeiden

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Bluephase G4



Befestigung

Variolink Esthetic LC



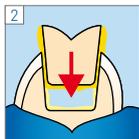
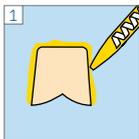


Bluephase G4




Restauration bis zum Ende der abschließenden Polymerisation fixieren

Liquid Strip

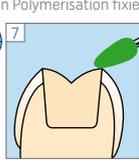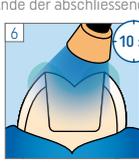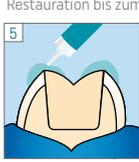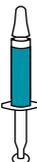

* pro Segment und mm Keramik

Fluor Protector S

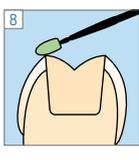

Hersteller
Ivoclar Vivadent AG
Benderstrasse 2
9494 Schaan/Liechtenstein
www.ivoclar.com

CE 0123



See Instructions

Erstellungsdatum:
2022-08-23
681582/DE/Rev.1

ivoclar



mehr Informationen unter
www.cementation-navigation.com

Variolink Esthetic® LC


Eingliederung von Veneers (Glaskeramik, z. B. IPS e.max®)

Einprobe


Variolink Esthetic Try-In



Auftragen der Try-In Paste

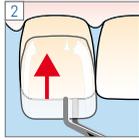


Einprobe der Restauration

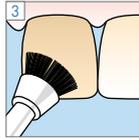


Reinigung nach der Einprobe





Trockenlegung

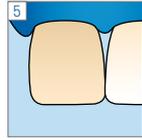


Restauration

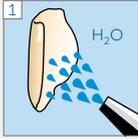

Monobond Etch & Prime

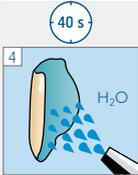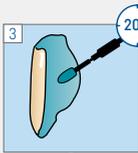


Präparation

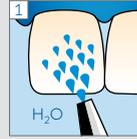

Total Etch:

optional

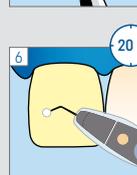

Adhese Universal





Pfützenbildung vermeiden

Bluephase G4




Befestigung

Variolink Esthetic LC

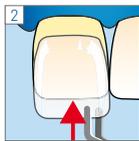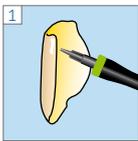


Bluephase G4

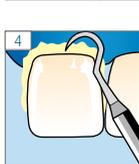


Restauration bis zum Ende der abschließenden Polymerisation fixieren

Liquid Strip

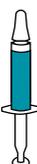

Polieren

Fluor Protector S

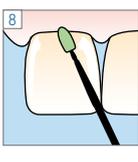

Hersteller
Ivoclar Vivadent AG
Benderstrasse 2
9494 Schaan/Liechtenstein
www.ivoclar.com

CE 0123



See Instructions

Erstellungsdatum:
2022-08-23
681582/DE/Rev.1

ivoclar



mehr Informationen unter
www.cementation-navigation.com