

LUNOS

Produktinformation

Polierpaste Two in One - Neutral, Orange, Minze



Produkt auf einen Blick

- Arbeitet nach dem Prinzip der „Selbstreduktion“. Anfangs größere Polierpartikel verkleinern sich während der Anwendung. So können in einem Arbeitsschritt in den ersten 10 Sekunden Verfärbungen und Plaque schonend entfernt und unmittelbar danach eine Glättung der Zahnoberfläche durch Politur erzielt werden.



- Zur Reinigung von Zahnoberflächen vor der Applikation von Fluoridpräparaten, Applikation von Bleachingpräparaten und Einsetzen von festsitzender Prothetik wie z.B. Inlays, Onlays, Kronen, Veneers etc.
- Zur Reinigung vor dem Aufbringen von orthodontischen Brackets und Einsetzen von Kompositrestaurationen geeignet.
- Die Rezeptur ist frei von tierischen Inhaltsstoffen, Gluten, Lactose, Fructose und Mikroplastik.
- Die LUNOS Polierpaste Two in One steht in drei Varianten zur Verfügung:
 - o Neutral
 - o Orange
 - o Minze

Eigenschaften

Die LUNOS Polierpaste Two in One ist eine hochwertige Polierpaste zum Einsatz in der zahnmedizinischen Prophylaxe. Die LUNOS Polierpaste Two in One entfernt Verfärbungen und Plaque äußerst schonend. LUNOS Polierpaste Two in One arbeitet auf dem innovativen Prinzip der „Selbstreduktion“. D.h. anfangs größere, stäbchenförmige Polierpartikel verkleinern sich und zerbrechen während des Poliervorgangs. So können in einem Arbeitsschritt in den ersten 10 Sekunden der Anwendung Verfärbungen und Plaque schonend entfernt und unmittelbar danach die Politur zur Glättung der Oberfläche vorgenommen werden.

Produktzusammensetzung

Die LUNOS Polierpaste Two in One Neutral enthält: Silikate, Glycerin, Aqua dest., Hydroxylapatit, Säureregulator, Konservierungsmittel (Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin), Verdicker, Emulgator.

Die LUNOS Polierpaste Two in One Orange enthält: Silikate, Glycerin, Aqua dest., Hydroxylapatit, Säureregulator, Konservierungsmittel (Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin), Verdicker, Emulgator, Farbstoff (C.I. 47005), Orangenaroma (enthält Limonene).

Die LUNOS Polierpaste Two in One Minze enthält: Silikate, Glycerin, Aqua dest., Hydroxylapatit, Säureregulator, Konservierungsmittel (Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin), Verdicker, Emulgator, Farbstoffe (C.I. 42090, C.I. 47005), Pfefferminzöl (enthält Menthol).

Kontraindikationen

Nicht anwenden bei fehlender Kontrolle über den Schluckreflex. Liegen bekannte Allergien gegen Orangenaroma (Limonene) oder Pfefferminzöl (Menthol) vor, ist die Variante „Neutral“ der LUNOS Polierpaste Two in One zu empfehlen. Vor Anwendung einer Fluoreszenzbasierten Kariesdiagnostik darf nicht die Variante „Minze“, sondern alternativ die Variante „Neutral“ oder „Orange“ verwendet werden.

Anwendung

Darf nur mit für die Prophylaxe geeigneten Polierinstrumenten eingesetzt werden. Ausreichende Menge Polierpaste entnehmen und in einen Applikationsring, z.B. dem Lunos Prophylaxering, Dap-penglas oder ähnliches geeignetes Gefäß einfüllen. Mit Polierinstrument Polierpaste aufnehmen und Poliervorgang beginnen. Bitte beachten Sie, dass der selbstreduzierende Effekt der Paste nach ca. 10 Sekunden eintritt. Bitte solange polieren bis die Polierpartikel sich verfeinert haben, damit nach Belagsentfernung ein glättender Effekt eintreten kann. Um Hitzeentwicklung am Zahn zu verhindern, muss immer ausreichend Polierpaste an Polierinstrument und Zahn vorhanden sein. Bitte achten Sie aus diesem Grund auch darauf, die maximal empfohlene Umdrehungszahl der Polierinstrumentenhersteller nicht zu überschreiten. Beachten Sie die Gebrauchsanweisung des Geräteherstellers.

LUNOS

Produktinformation

Polierpaste Two in One - Neutral, Orange, Minze

Physikalische Daten

RDA: 28*

* Methode nach Stookey/Schemehorn mit Referenzsubstanz Bimsstein für Prophylaxepasten [J Dent Res, 1979 58(2): p.588-592] relativer RDA-Wert im Vergleich zu Produkt „C“ = RDA 27 Messergebnisse: Produkt „C“ = 255 / Two in One = 260

Haltbarkeit

Produkt nach Ablauf des aufgedruckten Verfallsdatums nicht mehr verwenden. Nach Anbruch beträgt die Haltbarkeit 12 Monate.

Gebindegröße und Verkaufseinheit

100-g-Tube 10 x 100-g-Tube

Lagerung

Die Tube ist nach Entnahme der Paste sorgfältig zu verschließen, um ein Austrocknen der Paste zu verhindern. In geschlossenen, belüftbaren Räumen, unter Vermeidung von Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung zwischen 0 °C und 25 °C lagern.

Zubehör

LUNOS Prophylaxering

Allgemeine Hinweise

- Die LUNOS Polierpaste Two in One ist ein Medizinprodukt. Dieses Produkt ist nur für die professionelle zahnärztliche Anwendung bestimmt und darf ausschließlich von Fachpersonal angewendet werden!
- Bei der Arbeit mit LUNOS® Polierpaste Two in One auf geeignete Schutzausrüstung achten: Patient und Behandler müssen einen geeigneten Augenschutz, z.B. Schutzbrille tragen. Der Behandler muss geeignete Schutzausrüstung in Form von Mund-Nasen-Schutz und Schutzhandschuhen tragen.
- Pastenreste von Oberflächen der Behandlungseinheit mit einem feuchten Tuch entfernen.
- Für Kinder und Erwachsene geeignet sofern die Kontrolle über den Schluckreflex gegeben ist.
- Nicht verschlucken. Kontakt mit den Augen vermeiden.
- Alle im Zusammenhang mit dem Produkt auftretenden schwerwiegenden Vorkommnisse sind umgehend dem Hersteller und der zuständigen Behörde Ihres Mitgliedstaats zu melden.



Features	Benefits
„Two in One“ - Reinigung und Politur	- Reinigung und Politur in einem Arbeitsschritt - Zeit- und Kostenersparnis
Drei Pastenvarianten verfügbar:	
„Two in One Minze“ - mit Pfefferminzöl (enthält Menthol)	„Minze“ erfrischender Geschmack
„Two in One Orange“ - mit Orangenaroma (enthält Limonene)	„Orange“ angenehm, fruchtig, mild im Geschmack
„Two in One Neutral“ - ohne Aromen	„Neutral“
Fliptop-Verschluss	Besonders ergonomisch durch praktische Einhandöffnung

Vertrieb

Dürr Dental SE
Höfigheimer Str. 17
74321 Bietigheim-Bissingen
Germany
www.duerrdental.com
info@duerrdental.com

Hersteller

orochemie GmbH + Co. KG
Max-Planck-Straße 27
70806 Kornwestheim
Germany
www.orochemie.de
info@orochemie.com

