



## CEREC Primemill

Excellence made easy.

THE DENTAL SOLUTIONS COMPANY™



### Komfort

Die CEREC Primemill setzt einen neuen Standard in puncto Benutzerfreundlichkeit und macht die Praxisintegration erstaunlich einfach. Die interaktive Benutzeroberfläche führt den Anwender Schritt für Schritt durch die Arbeitsabläufe, so dass Sie das Schleifen und Fräsen völlig unbesorgt delegieren können. Die Einheit überwacht auf intelligente Weise Schlüsselfunktionen und -komponenten, um eine hohe Produktivität zu gewährleisten.



### Schnelligkeit

Unsere bisher schnellste Schleif- und Fräseinheit kann hervorragende Zirkonoxidkronen in weniger als 5 Minuten herstellen. Sie kann auch Glaskeramik viel schneller als das Vorgängermodell schleifen. Das Ergebnis: Zufriedene Patienten und eine hohe Produktivität.




### Vielseitigkeit

Sie haben die Qual der Wahl! Die neue CEREC Primemill kombiniert Nass- und Trockenfräsen sowie Nassschleifen mit der größten Auswahl an validierten Materialien. Dies gibt Ihnen die nötige Flexibilität und Vorhersagbarkeit, Ihre Patienten optimal zu behandeln.

CEREC MC XL

CEREC Primemill

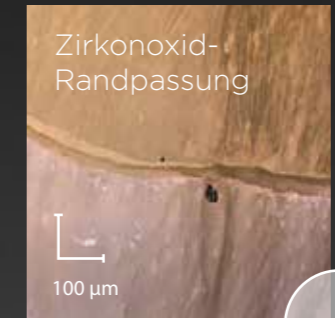

### Qualität

Hervorragende, natürlich aussehende Restaurationen sind das Resultat exzellenter und zuverlässiger Schleifprozesse. Erleben Sie es in jedem Detail Ihrer Versorgungen, von glatten Oberflächen und genauen Rändern über detaillierte Fissuren bis zur perfekten Passung.

Quelle: Dr. Josef Kunkela, DMD, Tschechien

# Sind Sie bereit für CEREC?



## Digitale Chairside-Zahnmedizin – neu definiert.

Für CEREC-Anwender ist es ganz klar: Mit CEREC werden selbst die besten Zahnärzte noch besser.

CEREC-Anwender werden Ihnen bestätigen, dass der Umstieg auf Digitaltechnik eine hervorragende Entscheidung war – auch wenn sie vorher ihre Zweifel hatten. Ist auf Anhieb alles glatt gelaufen? **Nein.** Haben Sie gelernt, mit der Technologie umzugehen? **Auf jeden Fall!** Wie ist die Qualität der Versorgungen? **In jeder Hinsicht überzeugend.**

Zusammen mit CEREC Primescan und der hoch automatisierten, intuitiven CEREC Software 5 bildet die neue, erstklassige Schleif- und Fräseinheit das perfekte Setup und den besten Zeitpunkt, um Ihre Praxis mit CEREC zukunftsfähig zu machen.

CEREC neu gedacht. **Jetzt ist die Zeit.**

### CEREC

Ein nahtloser Workflow mit großer Flexibilität für klinisch zuverlässige Ergebnisse.



## Jetzt ist die Zeit.

Das neue CEREC bietet Ihnen die richtigen Workflows für überlegene digitale Chairside-Zahnmedizin.

Die neueste Generation unseres CEREC-Systems setzt neue Standards, damit Sie Ihren Patienten eine unübertroffene Kombination aus Behandlungen in nur einer Sitzung und herausragender Qualität bieten können. Dank 35 Jahren kontinuierlicher Weiterentwicklung bietet Ihnen CEREC unzählige Möglichkeiten, um vielfältige Indikationen mit der Sicherheit behandeln zu können, die auf herausragenden Ergebnissen basiert.

Eine einzigartige Lösung für herausragende digitale Zahnmedizin.

Das CEREC-System umfasst erstklassige Komponenten, die perfekt aufeinander abgestimmt sind und so einen nahtlosen Arbeitsablauf garantieren. CEREC Primescan liefert umgehend hochpräzise Scandaten an die neue CEREC Software 5 und unterstützt Sie mit patientenspezifischen Vorschlägen, die auf dem patentierten Biokiefer-Algorithmus basieren. Aber die beeindruckendste Komponente dieses Systems ist die neue CEREC Primemill. Mit dieser hochmodernen Schleif- und Fräseinheit ist digitale Chairside-Zahnmedizin schneller, einfacher und zuverlässiger als je zuvor.



# Excellence made easy

## CEREC Primemill

### Schnelligkeit

#### Super Fast Produktionsmodus

Ausgelegt auf Schnelligkeit und Präzision, übernimmt die neue CEREC Primemill die bewährten Stärken des Vorgängermodells und hebt die Leistungsfähigkeit auf ein völlig neues Level. Mit dem Super Fast Modus können Sie jetzt Zirkonoxid-Restaurationen in ca. 5 Minuten herstellen und die Bearbeitungszeit auf weniger als die Hälfte reduzieren.

#### Schnelles Schleifen

Verbesserter schneller Schleifmodus für qualitativ hochwertige Glaskeramik-Restaurationen in kürzerer Zeit.

### Komfort

#### 7-Zoll Touch Interface mit Benutzerführung

Das neue Touch Interface wurde speziell unter dem Aspekt von Delegation und Integration entworfen. Es führt Benutzer nicht nur durch jeden Arbeitsablauf, sondern leitet sie auch Schritt für Schritt durch wichtige Wartungsverfahren und andere Routineaufgaben.

#### Integrierter Blockscanner

Diese neue zeitsparende Funktion scannt automatisch Materialblöcke mit kompatiblen Data Matrix Codes und zeichnet die Informationen, einschließlich Art, Größe, Farbe und Zirkonoxid-Vergrößerungsfaktor, auf.

#### RFID Tool Reader

Alle CEREC Primemill-Werkzeuge sind mit einem farbkodierten RFID-Chip versehen, der vom RFID-Scanner gelesen wird und den Benutzer durch die Anzeige des Werkzeugstatus darauf aufmerksam macht, wenn ein Werkzeug ersetzt werden muss. So wird gewährleistet, dass alle Werkzeuge die optimale Leistung erbringen, wodurch die Produktivität gesteigert wird.



### Qualität

#### Neue Komponenten zur Qualitätssteigerung

Die Kombination aus neuer Elektronik, Software, Motoren und mechanischen Komponenten trägt zu einer feineren Auflösung und verbesserten Dynamik bei. Daraus ergeben sich herausragende Restaurationsränder und Oberflächendetails für extrem präzise Ergebnisse.

#### Neu: 0,5-mm-Fräswerkzeug

Dieses hochpräzise neue Werkzeug liefert zuverlässig klinische Ergebnisse der Spitzenklasse. Wechseln Sie in den Extra Fein-Fräsmodus für einen höheren Detailgrad bei okklusalen Fissuren und approximalen Bereichen von Brücken.

### Design, das auffällt – und sich einfügt

Die neue CEREC Primemill kommuniziert nicht nur nahtlos mit anderen CEREC-Geräten, sie passt ebenso zu deren modernem Design und hat den perfekten Look für eine zukunftsorientierte Zahnarztpraxis.

- ✓ Der innovative LED-Leuchtstreifen zeigt den Gerätestatus und Produktionsfortschritt an.
- ✓ Das neue Design der Schublade sorgt dafür, dass auf Werkzeuge und Zubehör direkt zugegriffen werden kann.
- ✓ Sämtliche Oberflächen und die Schleifkammer sind einfach zu reinigen.

### Vielseitigkeit

#### Beste Fräs- und Schleifoptionen ihrer Klasse

Wählen Sie aus dem vollen Spektrum der Bearbeitungsoptionen, einschließlich trocken- und nassgefrästem Zirkonoxid oder Nassschleifen von Glas- und Hybridkeramik.

#### Umfangreiche Auswahl an Materialien

Mit der CEREC Primemill steht Ihnen für jede Indikation eine große Bandbreite an Materialoptionen von validierten Partnern zur Verfügung.