

## Zeta 7 Solution

### Abformdesinfektion, Konzentrat

#### Wirkungsspektrum:

- ✓ Bakterizid
- ✓ Levurozid (Candida albicans)
- ✓ Begrenzt viruzid
- ✓ Wirksam gegen Tuberkulose-Erreger

#### Art der Anwendung:

Präparat zur Desinfektion dentaler Abformmaterialien.

#### Hinweise zur Anwendung:

Gleich nach der Abformung den Abdruck 30 Sekunden unter fließendem Wasser abspülen. Durch Sichtkontrolle des Abdrucks sicherstellen, dass jede sichtbare Verunreinigung beseitigt wurde. Bei sichtbarer Kontamination den Spülvorgang wiederholen. Die Abformung für 10 Minuten in die 1%ige Lösung Zeta 7 Solution eintauchen (mit dem Messbecher der Flasche 10 ml Zeta 7 Solution dosieren und pro Liter Wasser zusetzen). Die Abformung aus der Schale nehmen und sorgfältig abspülen. Die empfohlene Eintauchzeit muss unbedingt beachtet werden. Die Desinfektionslösung täglich ersetzen und an einem Tag niemals mehr als 40 Abdrücke mit derselben Lösung desinfizieren. Die Lösung sofort ersetzen werden, insbesondere bei Vorhandensein sichtbarer Verunreinigungen (Blut, Speichel oder organisches Gewebe) und/oder bei Veränderung von Farbe/Geruch der Desinfektionslösung, da dies die Desinfektionswirkung beeinträchtigen kann. Nicht verwendete Desinfektionslösungen bleiben bei Aufbewahrung in einem vor Licht und Wärme geschützten, dichten Kunststoffbehälter (HDPE, GPPS, ABS, PP und PMMA) 7 Tage stabil. Nur für professionelle Anwender.

#### Einwirkzeiten:

Wirkungsspektrum / Einwirkzeiten	Konz.	Min.
Bakterien nach EN 13727	1,0 %	10 Min.
Candida albicans nach EN 13624	1,0 %	10 Min.
Tuberkolizid (M. terrae) nach EN 14348	1,0 %	10 Min.
Tötet behüllte Viren ab. einschließlich HIV, HBV, HCV nach EN 14476	1,0 %	10 Min.



Gefahr



#### Sicherheitshinweise:

Haut und schwere Augenschäden. H 410  
 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. Freisetzung in die Umwelt vermeiden.  
 Schutzhandschuhe / Augenschutz tragen.  
 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar):  
 Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen / duschen.  
 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM / Arzt anrufen. Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen / internationalen Vorschriften.  
 Enthält N-(3-Aminopropyl)-N-dodecyl-propan-1,3-diamin. Didecyldimethylammoniumchlorid

#### In 100 g sind enthalten:

100 g Zeta 7 Solution enthalten 7.7 g Didecyl-dimethylammoniumchlorid, 15 g Phenoxyethanol, nicht-ionische Tenside, Additive, Hilfsstoffe und Wasser.

#### VO 648/2004/EG:

Enthält 5 – 15 % nichtionische Tenside,  
 < 5 % kationische Tenside,  
 < 5 % EDTA-Salze, Duftstoffe

#### Artikelnummern:

C800817 Zeta 7 Solution, Konzentrat, 1000 ml  
 Produktspezifische UFI-Nr.:

