

Produktinformation

FD multi wipes green / FD multi wipes compact green

Vliestücher



FD multi wipes green/FD multi wipes compact green auf einen Blick

- Hochwertige, reißfeste und fusselfreie trockene Vliestücher in wiederbefüllbarer Spenderbox.
- Die Tücher sind aus umweltschonend produzierten, plastikfreien Naturfasern hergestellt.
- Ausschließlich einsetzbar für die Gebrauchslösungen von FD 312 4 %ig, FD 322, FD 333 und FD 333 forte.
- Fein strukturierte Vliestücher – sehr gute Benetzung und kein Zerkratzen der Oberflächen.
- Extragroße Tücher mit 200 x 300 mm oder 290 x 300 mm.
- Nachgewiesene Desinfektionswirkung und Stabilität der Wirkstofflösungen.
- Wirksam vom ersten bis zum letzten Tag – verwendbar innerhalb von 28 Tage.
- Praktische wiederverschließbare Spenderbox zum Nachfüllen.
- Hohe Wirtschaftlichkeit – große Zeitersparnis durch einmalige Herstellung der getränkten Desinfektionstücher und sparsamer Desinfektionsmittelverbrauch. Ausreichend für 180 bzw. 60 Desinfektionsvorgänge.

Eigenschaften

FD multi wipes green/FD multi wipes compact green aus der Dürr System-Hygiene sind besonders hochwertige, reißfeste Vliestücher. FD multi wipes green/FD multi wipes compact green sind ausschließlich zur Tränkung mit den Produkten FD 312 4 %ig, FD 322, FD 333, FD 333 forte geeignet. Die Tücher sind aus umweltschonend produzierten, plastikfreien Naturfasern hergestellt. FD multi wipes green/FD multi wipes compact green geben die Desinfektionslösung sehr gut ab und gewährleisten die vollständige Benetzung der zu desinfizierenden Flächen. FD multi wipes green/FD multi wipes compact green lassen sich aufgrund ihrer Größe und ihres Materials leicht falten und den Anforderungen anpassen, so dass auch kleine und verwinkelte Oberflächen erreicht werden können. Die Verwendung der FD multi wipes green/FD multi wipes compact green reduziert die Vorbereitungszeit für die Desinfektionsmaßnahmen und den Desinfektionsmittelverbrauch. Die getränkten FD multi wipes green/FD multi wipes compact green in der Spenderbox sind vor Kontamination und Verdunstung geschützt.

Produktzusammensetzung

FD multi wipes green sind Vliestücher in einer Größe von 200 x 300 mm. FD multi wipes compact green sind Vliestücher in einer Größe von 290 x 300 mm.

Anwendung

FD multi wipes green/FD multi wipes compact green werden zur Reinigung und Desinfektion von Flächen wie Behandlungseinheiten, Arbeitsflächen, Wänden, Gegenständen aller Art, medizinischen Geräten, etc. angewendet. Zur Befüllung der Spenderbox Hände desinfizieren und Handschuhe anziehen. FD 312 als 4 %-ige Wirkstofflösung herstellen. FD 322, FD 333 und FD 333 forte sind gebrauchsfertige Lösungen, die ohne Verdünnung angewendet werden. Handschuhe anziehen. Vliestücher in der Spenderbox der FD multi wipes green mit 2,5 l Wirkstofflösung, bzw. der FD multi wipes compact green mit 1,4 l Wirkstofflösung gleichmäßig tränken, Tuch einfädeln, Spenderbox dicht verschließen und 30 bis 60 Minuten bis zur erstmaligen Anwendung abwarten. Auf dem jeder Vliesrolle beiliegenden Etikett Produktname, Konzentration,

Produktinformation

FD multi wipes green /

FD multi wipes compact green

Vliestücher

Chargenbezeichnung, Ansatzdatum und Haltbarkeit sowie den Namen der verantwortlichen Person eintragen und auf dem wieder-verschließbaren Deckel der Spenderbox aufkleben. Handschuhe anziehen. Tuch entnehmen und die zu desinfizierende Oberfläche durch Wischen vollständig benetzen. Einwirkzeit entsprechend Gebrauchsinformation des eingesetzten Desinfektionsmittels einhalten. Spenderbox nach jeder Tuchentnahme wieder dicht verschließen. Vor Wiederbefüllung bzw. Produktwechsel Vliestuch- und Flüssigkeitsrückstände aus der Spenderbox entfernen sowie Etikett auf dem Deckel entsorgen.

Maschinelle Aufbereitung der Spenderbox inkl. Deckel: Im Reinigungs- und Desinfektionsgerät bei bis zu 93 °C chemothermisch aufbereiten und trocknen.

Alternativ kann eine manuelle Aufbereitung der Spenderbox inkl. Deckel erfolgen: Spenderbox inkl. Deckel innen und außen mit heißem Leitungswasser (> 55 °C – Achtung: Verbrühungsgefahr!) gründlich abspülen und mit Einmaltuch trocknen. Danach Spenderbox und Deckel gemäß der KRINKO-Empfehlung zur Anforderung an die Hygiene bei der Reinigung und Desinfektion von Flächen mit einem bakteriziden, fungiziden und sporiziden Produkt vollständig benetzen und gründlich desinfizieren (Einwirkzeit beachten!) Auf eine vollständige Abtrocknung achten. Weitere Herstellerangaben und ggf. vorhandene nationale Anforderungen an die Aufbereitung beachten.

Nach der Aufbereitung defekte oder sichtbar kontaminierte Spenderboxen ersetzen.

Neue Tuchrolle in die gereinigte und getrocknete Spenderbox geben und - wie oben beschrieben - tränken, Tuch einfädeln, Deckel dicht verschließen, neu beschriftetes Etikett auf den Deckel kleben, Wartezeit abwarten. Frei herausragende Tücher können kontaminiert sein, daher verwerfen. Entnommene Tücher nicht in den Eimer zurückschieben. Ausgetrocknete Tücher nicht mehr verwenden.

Umweltverhalten

Die Verpackungsfolie besteht aus nachwachsenden Rohstoffen. Gebrauchte Tücher über Hausmüll entsorgen. Nicht über das WC entsorgen.

Haltbarkeit

Getränkte Tücher innerhalb von 28 Tagen aufbrauchen (FD 312 4 %ig, FD 322, FD 333 und FD 333 forte). Detaillierte Informationen siehe Produktinformationen zu den Präparaten im Internet.

Packungsgrößen

FD multi wipes green:

Spenderbox mit 1 Tuchrolle à 180 Tüchern.

Nachfüllpackung mit 4 Tücherrollen à 180 Tüchern im Karton.

FD multi wipes compact green:

Spenderbox mit 1 Tuchrolle à 60 Tüchern.

Nachfüllpackung mit 8 Tücherrollen à 60 Tüchern im Karton.

Allgemeine Hinweise

Anwendung ausschließlich durch Fachpersonal. Alle im Zusammenhang mit dem Produkt auftretenden schwerwiegenden Vorkommnisse sind umgehend dem Hersteller und der zuständigen Behörde Ihres Mitgliedstaats zu melden.



Vertrieb

Dürr Dental SE
Höfigheimer Str. 17
74321 Bietigheim-Bissingen
Germany
www.duerrdental.com
info@duerrdental.com

Hersteller

orochemie GmbH + Co. KG
Max-Planck-Straße 27
70806 Kornwestheim
Germany
www.orochemie.de
info@orochemie.de